



Parvo i Corona virus

Brzi test za otkrivanje Parvo i Corona virusa

Princip

BioNote rapid CPV CCV je hromatografski imuno-esej za kvalitativnu detekciju parvo i corona virusa u fecesu psa ili macke.

Test instrument je obelezen sa slovom "T" gde treba da se pojavi linija ukoliko je virus prisutan i test pozitivan, i slovo "C" za kontrolu, koja se uvek pojavljuje kada se doda uzorak, ako su reagensi ispravni. Pre dodavanja uzorka nema linija.

Test kit sadrzi (10 testova/kit)

1. 10 Rapid CPV CCV Ag testova
2. 10 tuba sa puffer diluentom
3. 10 Stapica za bris
4. 10 jednokratnih kapaljki

Mere opreza

1. samo za veterinarsku dijagnostiku
2. Striktno se pridržavati uputstva da bi se dobili najbolji rezultati
3. Sve uzorke tretirati kao potencijalno infektivne
4. Ne otvarati testove do neposredno pre upotrebe
5. Nekoristiti test ukoliko je individualno pakovanje bilo otvoreno
6. Svi testovi moraju biti na sobnoj temperaturi
7. Ne koristiti testove čiji je rok trajanja istekao
8. Sve komponente testa su prošle strogu kontrolu kvaliteta

Cuvanje i stabilnost

- Cuvanje na sobnoj temperaturi (2~30).
- Ne smrzavati!
- Cuvati od direktnog suncevog svetla.

- Test je stabilan do obelezenog datuma trajanja.

Dobijanje uzorka i njegova priprema

1. Feces psa treba biti iskoriscen za ovaj test
2. Uzorak mora biti testiran odmah nakon uzimanja

Procedura testa

1. Stapic za bris se potopi u feces (do $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ stapica).
2. Stapic se potopi u tubu sa diluentnim puferom
3. Tester se izvadi izplasticne folije I stavi na ravnu i suhu podlogu
4. **Oprezno I sporo se nakapa 4 kapi (jedna za drugom!) u tester.**
5. Kada testiranje pocne da se desava, videcete ljubicastu boju koja se pomera kroz tester.
6. Interpretirajte test rezultate za 5-10 minuta.



Interpretacija testa

Objena linija ce se pojaviti u levom delu rezultatskog prozora da pokaze da testiranje funkcioniše kako treba.

U desnoj strani prozora se pojavljuje linija samo ako ukoliko je test pozitivan.

Limitacija testa

Iako je BioNote test veoma tacan u otkrivanju stenecaka u veoma malom broju slucajeva, test moze biti lazno negativan. Ukoliko se posumnja na rezultat, treba se uzeti drugi test (BioNote ili druge firme).

Brzi test za otkrivanje Parvo i Corona virusa

Napisao Webmaster - Poslednje ažurirano sreda, 27 jun 2012 16:09

Kao kod svih ostalih dijagnostičkih testova, BioNote test treba biti samo jedan od dijagnostičkih parametara, pored anamneze, kliničke slike, laboratorijskih nalaza, odgovora na terapiju...