



## Brzi test za otkrivanje štenaćaka

*(Canine Distemper Virus)*

### Princip

**BioNote rapid CDV** je hromatografski imuno-esej za kvalitativnu detekciju virusa Stenecaka u konjuktivi pasa.

Test instrument je obelezen sa slovom "T" gde treba da se pojavi linija ukoliko je virus prisutan i test pozitivan, i slovo "C" za kontrolu, koja se uvek pojavljuje kada se doda uzorak, ako su reagensi ispravni. Pre dodavanja uzorka nema linija.

### Test kit sadrzi (10 testova/kit)

1. 10 Rapid CDV Ag testova
2. 10 tuba za uzorak sa diluentnim puferom
3. 10 stapica za bris
4. 10 jednokratnih kapaljki

### Mere opreza

1. samo za veterinarsku dijagnostiku
2. Striktno se pridržavati uputstva da bi se dobili najbolji rezultati
3. Sve uzorke tretirati kao potencijalno infektivne
4. Ne otvarati testove do neposredno pre upotrebe
5. Nekoristiti test ukoliko je individualno pakovanje bilo otvoreno
6. Svi testovi moraju biti na sobnoj temperaturi
7. Ne koristiti testove čiji je rok trajanja istekao
8. Sve komponente testa su prošle strogu kontrolu kvaliteta

### Čuvanje i stabilnost

- Čuvanje na sobnoj temperaturi (2~30).
- Ne smrzavati!
- Čuvati od direktnog sunčevog svetla.

## Brzi test za otkrivanje Stenecaka

Napisao Webmaster - Poslednje ažurirano utorak, 26 jun 2012 21:13

---

- Test je stabilan do obelezenog datuma trajanja.

### Dobijanje uzorka i njegova priprema

1. Uzorak sa konjunktive treba biti iskoriscen za ovaj test
2. Uzorak mora biti testiran odmah nakon uzimanja

### Procedura testa

1. Okvasi si se stacic za bris u NaCl rastvoru i onda se napravi bris konjunktive.
2. Tapic se onda umoci u tubicu sa diluentom.
3. Snazno se vrti stacic da bi virus sa njegove vate izasao u tecnost diluenta.
4. Tester se izvadi izplasticne folije i stavi na ravnu i suhu podlogu
5. **Oprezno i sporo se nakapa 4 kapi (jedna za drugom!) u tester.**
6. Kada testiranje pocne da se desava, videcete ljubicastu boju koja se pomera kroz tester. Ako se ova migracija ne desava, dodajte jos 1 kap uzorka pomesanog u diluentu.
7. Interpretirajte test rezultate za 5-10 minuta.



### Interpretacija testa

Objena linija ce se pojaviti u levom delu rezultatskog prozora da pokaze da testiranje funkcioniše kako treba.

U desnoj strani prozora se pojavljuje linija samo ako ukoliko je test pozitivan.

### Limitacija testa

Iako je SDV test veoma tacan u otkrivanju stenecaka u veoma malom broju slucajeva, test moze biti lazno negativan. Ukoliko se posumnja na rezultat, treba se uzeti drugi test (BioNote ili druge firme

Kao kod svih ostalih dijagnostickih testova, CDV test treba biti samo jedan od dijagnostickih

## Brzi test za otkrivanje Stenecaka

Napisao Webmaster - Poslednje ažurirano utorak, 26 jun 2012 21:13

---

parametara, pored anamneze, klinicke slike, laboratorijskih nalaza, odgovora na terapiju...